

VERARBEITUNGSANLEITUNG Matrix Form blue 78

Kondensationsvernetztes Knetsilikon mit Pastenhärter für die Vorwalltechnik und Übertragungsschlüssel.

Anwendung:

Matrix Form wird im Verhältnis 20g:0,8g.
Paste/Härter mit den Händen gut durchgeknetet, bis kein Pastenhärter mehr sichtbar ist. Das Material mit leichtem Druck auf das Modell aufbringen. Beim Ausvulkanisieren bitte nicht bewegen.

Technische Daten:

Mischverhältnis	20g:0,8g
Shorehärte nach 1 Stunde	78
Shorehärte nach 24 Stunden	80
Anmischzeit	40 Sekunden
Verarbeitungszeit bei 23°C	1:30 Minuten
Vulkanisationszeit bei 23°C	3 Min.
V-zeit unter 2,5bar Druck	3 Min

Lagerung:

Den Behälter immer gut gelüftet, separat und verschlossen lagern.

Packungsinhalt:

500g